



El nebulizador de compresión médica Lenz está diseñado para el uso de toda la familia, en el hogar. Gracias a su motor de alta calidad y a su tecnología alemana, brinda un excelente desempeño sin recalentamiento durante el periodo de uso necesario.

<b>Uso para</b>	<b>Tecnología</b>	<b>Incluye kit</b>	<b>Con bolsa</b>	<b>Uso</b>	<b>Partículas</b>
toda la familia	Alemana	de nebulización	protectora	adulto / pediátrico	Tamaño 1 µm~5 µm (≥ 60 %)



### Kit de nebulización

- Mascarilla en silicona
- Tubo de aire en silicona
- Copa dosificadora

**Hasta 120hrs** de operación continua

**Partículas atomizadas** para mayor absorción

## Especificaciones Técnicas

Referencia	LT-N700
Fuente de alimentación	110V / 60HZ
Tamaño de partículas	1 µm~5 µm (≥ 60 %)
Consumo de energía	≤ 62V
Tasa de nebulización	≥ 0,2 ml/min
Capacidad taza de medicación	8 ml
Presión atmosférica	50 kPa ~ 106 kPa
Dimensión	155 * 155 * 95mm
Peso neto	1,26 kg

## ¿Qué incluye?

Mascarilla en silicona	1
1 filtro de algodón de repuesto	2
Tapa de vaso de líquido	3
Taza de líquido	4
Cuerpo de nebulización	5
Tubo de conexión	6
Manual de usuario y bolsa protectora	7

## Almacenamiento y transporte

Temperatura	5 ~ 40°C
Humedad	≤ 83% RH

## Partes del dispositivo

- 1 Mascarilla
- 2 Botón de encendido y apagado
- 3 Copa de medicación
- 4 Soporte para copa o cámara
- 5 Aberturas de ventilación
- 6 Filtro y tapa de filtro
- 7 Tubo de aire en silicona



## Mantenimiento

- 1 El filtro de aire debe ser reemplazado cuando se torne de color gris.
- 2 El resto del dispositivo debe ser inspeccionado solo por personal técnico autorizado.
- 3 Limpiar y hacer funcionar con agua caliente el nebulizador durante unos minutos para evitar obstrucciones y eliminar restos del medicamento usado.
- 4 Todas las piezas a excepción de los filtros, pueden esterilizarse con agua caliente.