

## ELECTRODOS ADHESIVOS CUADRADOS X4 UNIDADES - 5X5 CM BLANCO

Los electrodos adhesivos cuadrados están diseñados para transmitir a nuestro cuerpo los impulsos eléctricos que genera el electroestimulador.

Estos electrodos vienen con un adhesivo acrílico, material resistente, son duraderos y seguros para cualquier usuario.




### CARACTERÍSTICAS

Están diseñados para su uso con estimulación eléctrica.

- Antes de la aplicación del electrodo limpie con agua y jabón, y posteriormente seque el área.
  - Fije los conductores de los cables a los electrodos.
  - Retire con cuidado los electrodos de la lámina de almacenamiento, y conserve la bolsa para guardarlos.
- Nota:** no pegar los electrodos juntos, sino sobre una superficie plástica.
- 1 Coloque los electrodos en la piel, aplicando la parte del centro y deslizando hacia afuera.
  - 2 Conecte los electrodos a los cables, verificando que el dispositivo se encuentre apagado.
  - 3 Encienda el dispositivo y ajuste gradualmente la intensidad de la corriente.
  - 4 Cuando complete el tratamiento, apague el equipo y retire con cuidado sin halar el cable de los electrodos.

### PRESENTACIÓN

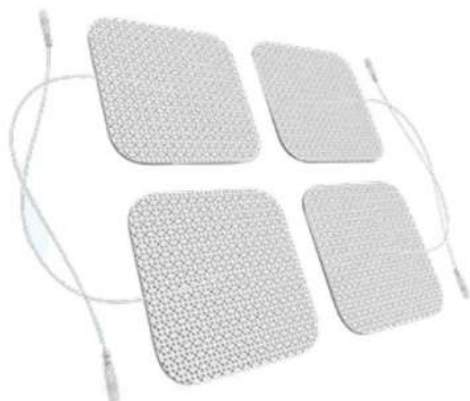

### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Electrodos Cuadrados
Autoadhesivos - Reutilizables
Tela blanca 2"x 2" (5x5cm)
Conector de 2mm, cable de cobertura, durabilidad y dispersión total de la corriente
4 unidades por paquete sellado

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383

Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: [insumeds@hotmail.com](mailto:insumeds@hotmail.com)

Santander, Colombia